

Häufige Fragen zum Thema : Gebrauch und Wartung des Schwimmbadlifter Leaquatic

1) Wie lange dauern die Batterien ohne Aufladung?

Die Batterien können bis zu 150 Hebensbewegungen versichern. Die Abstiegsbewegungen sind möglich dank des Ventils, das den Verdichtungsdruck auf dem Hebenskolben reduziert, und der Arm steigt aufgrund der Schwerkraft ab.

2) Bis zu welcher Tiefe kann der Schwimmbadlifter absteigen ?

Der Arm kann bis zum 90 cm Tiefe absteigen. In den Schwimmbecken, wo das Wasser bis am Rand ist, ist es besser, der Arm vorher aufzuhören. In den Schwimmbecken, wo das Wasser ungefähr 30 cm unten dem Rand ist, sind die anderen 60 cm genug.

3) Wie viele Kilos kann der Schwimmbadlifter tragen ?

Die Tragfähigkeit im Projektphase war 140 kg, die Homologation ist für Nennnutzlast 110 kg, die Tragfähigkeit ist 120 – 130 kg. Man kann einen Fuß auf dem Ballast stellen, um das Kippen des Lifter zu vermeiden.

4) Wenn die Batterien entladen sind, wie kann man die Bewegung des Arms versichern ?

Man findet eine Handpumpe, die die Bewegung des Armes ermöglicht, wenn die Batterien entladen sind. Die Handpumpe ist im Rahmen, man soll die Handkurbel an die Elektrohydraulische Pumpe verbinden . Danach ist es möglich, den Arm auf – oder abzusteigen.

5) Wenn ein Notfall stattfindet, wie kann man den Arm sofort aufhören ?

Der Schwimmbadlifter ist mit 5 Sicherheitssystemen ausgestattet. Man findet auch einen Rot- Notstand Knopf auf dem Armaturenbrett, wenn man diesen Knopf drückt, hört den Lifter sofort auf.

6) Wie kann man den Lifter am Bord des Schwimmbecken aufhören?

Der Bremsenhebel versichert das Aufhören des Lifter , wenn er nicht aktiviert wird, funktioniert der Lifter nicht.

7) Wenn der Lifter geht mit dem Vorderfüßen über den Bord, wie kann man den Lifter aufhören ?

Der Lifter ist ausgestattet mit 2 Füße aus Gummi, die das Kippen des Lifter vermeiden.

8) Wie lange dauert die Aufladung der Batterien ?

Ungefähr 5 Stunden, wenn sie völlig entladen sind. Es ist besser, das Niveau der Batterien auf dem Batterieladegerät zu überprüfen. Um das Leben der Batterien zu verlängern, ist es nötig, sie immer aufzuladen, auch wenn der Lifter nicht benutzt wird.

9) Was für eine Garantie hat der Schwimmbadlifter ?

Der Lifter hat eine Garantie für 2 Jahre, aber die Batterien haben eine Garantie für 6 Monate.

Die Garantie ist nicht gültig, wenn der Lifter von nicht berechtigten Personen erbrochen wird.

10) Was für eine Wartung soll man ausführen ?

Keine Wartung ist nötig, man soll das Niveau der Batterien überprüfen. Wenn der Schwimmbadlifter sehr oft benutzt wird, kann man die jährliche Wartung bei einer Vertragswerkstatt ausführen. .

11) Im Fall einer Reifenpanne, wie kann man den Reifen wechseln ?

Der Schwimmbadlifter ist ausgestattet mit selbstabdichtenden Reifen, auf jedem Fall kann unser Kundendienst die Ersatzteile innerhalb 72 Stunden überall Europa schicken. Es ist auch möglich, ein Techniker innerhalb 3 – 4 Tagen zur Verfügung zu stellen.

12) Der Schwimmbadlifter wurde bei einem Zusammenstoß beschädigt. Die Lackierung wurde verkratzt. Wie kann man den Rost vermeiden ?

Die Lackierung und die Verzinkung sind genug, um den Rost zu vermeiden. Der Schwimmbadlifter ist mit einem kleinem Plastikgefäß mit Lackfarbe ausgestattet, so kann man der Lifter ausbessern. (bitte vorher die beschädigte Fläche mit Sandpapier behandeln).

Der Schwimmbadlifter ist auch mit 2 Vorderfüße ausgestattet, die sich auf den Boden stützen und das Kippen des Lifter vermeiden.